

**I N D I A**

Conscious Care.

STEROGAS**Disinfettante esotermico, generatore di aldeide formica, per uso professionale****Uso a cura di personale specializzato**Presidio Medico-Chirurgico: registrazione Min. della Salute n. 5819**Composizione, 100 g di formulato contengono:**

Paraformaldeide	g 28
(sviluppatore Aldeide formica)	g 26.6
Miscela esotermica	g 72

Proprietà

STEROGAS è un disinfettante esotermico, generatore di aldeide formica gassosa, dotato di azione battericida, sporicida e virulicida. Alla sicura azione biologica, associa l'assenza di azione deteriorante o comunque imbrattante, che lo rendono particolarmente adatto per la disinfezione terminale e periodica nonché per la bonifica di qualsiasi oggetto anche se costoso e delicato.

Compatibilità

Lo Sterogas deve essere usato tal quale, associato al momento dell'uso, alla giusta dose di acqua.

Campo d'applicazione

STEROGAS si usa nei seguenti casi:

- disinfezione terminale: camere d'ammalati, effetti lettereschi e suppellettili, indumenti del malato, ecc.;
- disinfezione periodica: aule scolastiche, ambulatori, camere di ospedali, sale operatorie, sale d'aspetto, camere d'alberghi, autolettighe, automezzi di pubblico trasporto;
- disinfezione di oggetti delicati e costosi: indumenti in genere, pellicce, tappeti, tendaggi, quadri, libri, ecc..

Modalità d'impiego

- 1) Chiudere l'ambiente da disinfettare, avendo cura che gli oggetti in esso contenuti quali: armadi, cassettoni, letti, materassi, cuscini, quadri, tendaggi, ecc., siano scostati dai muri o sistemati in modo da permettere il contatto delle loro superfici con il gas disinfettante. Calcolare la cubatura del locale per stabilire il numero delle dosi di STEROGAS necessarie per il trattamento; ogni dose di STEROGAS assicura la disinfezione di 70 m³ di ambiente.
- 2) Indossare maschera protettiva **prima** di far iniziare la reazione esotermica di STEROGAS.
- 3) Vuotare il contenuto del barattolo di STEROGAS in un recipiente qualsiasi (meglio un secchio di plastica) della capacità di 10 lt circa; si mescoli e si aggiungano 500 cc di acqua, per dare inizio alla reazione. Uscire dall'ambiente chiudendo bene il vano d'ingresso, per rientrarvi dopo almeno 8 ore.



INDIA

Conscious Care.

- 4) Trascorso tale termine, rimettersi la maschera ed aprire porte e finestre.
- 5) Arieggiare l'ambiente e rientrarvi solo quando è scomparso il caratteristico odore della formaldeide.

Avvertenze

Per un corretto e sicuro impiego attenersi alle istruzioni riportate in etichetta, leggere e conservare la scheda di sicurezza. Chi utilizza il prodotto è responsabile nei confronti di terzi per eventuali danni derivanti dal suo impiego.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Confezioni

STEROGAS è disponibile in barattoli monodose da kg 0,5 (in cartoni da 24 pezzi). Con un barattolo si trattano ambienti da 70 mc di volume.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali : agronomi, disinfestatori, igienisti, medici, parassitologi, veterinari.